


Огромный выбор насадок для точного и неинвазивного лечения

В ассортименте компании SATELEC® имеется более 70 насадок, совместимых с наконечником для терапии.

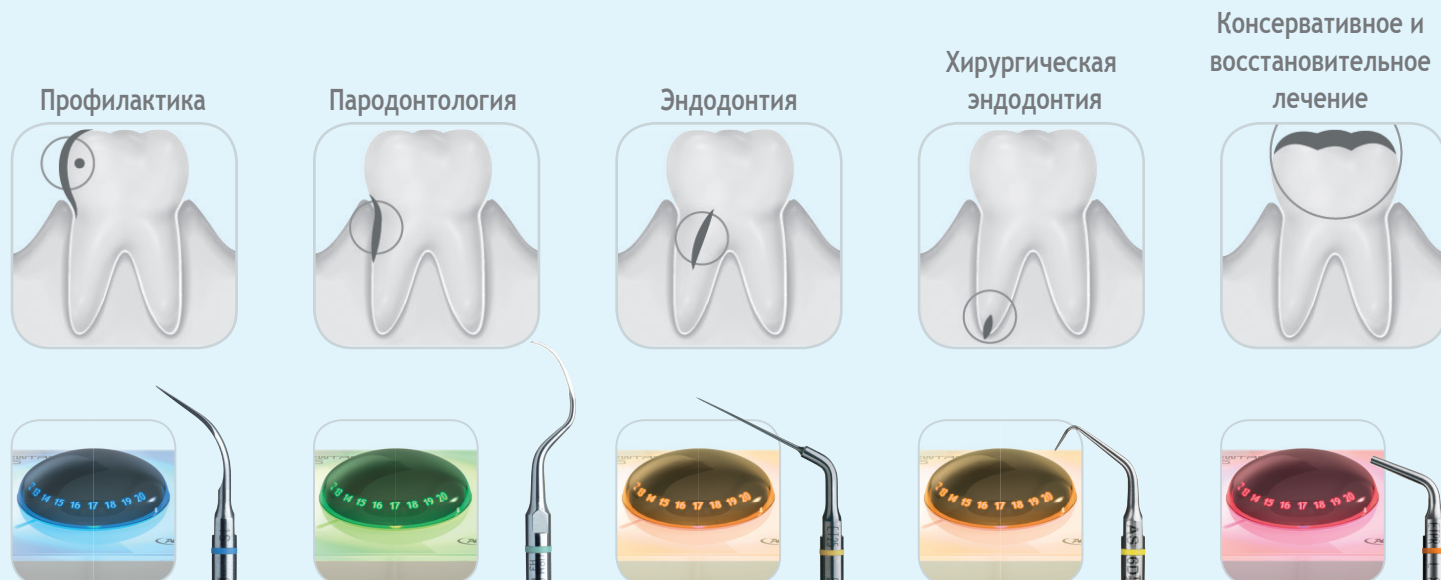

Технические данные

NEWTRON P5

Ирригация: подключается к магистрали

Давление воды: 1 до 5 бар

Наконечник:
NEWTRON SLIM F12901

Вес наконечника (гр): 44

Вес прибора (гр): 1650

Размеры (ГхШхВ):
155x185x100

NEWTRON P5

BLED

Ирригация: подключается к магистрали

Давление воды: 1 до 5 бар

Наконечник: LED
NEWTRON SLIM B.LED
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника (гр): 48

Вес прибора (гр): 1650

Размеры (ГхШхВ):
155x185x100

Жидкий индикатор налета
F.L.A.G.™ для B.LED

NEWTRON P5xs

BLED

Ирригация: 300 мл контейнер
(500 мл опционально)

Скорость ирригации:
5 - 40 мл/мин

Наконечник: LED
NEWTRON SLIM B.LED
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника (гр): 48

Вес прибора (гр): 2100

Размеры (ГхШхВ):
260x185x140

Жидкий индикатор налета
F.L.A.G.™ для B.LED

NEWTRON P5xs

Bluetooth BLED

Ирригация: 300 мл контейнер
(500 мл опционально)

Скорость ирригации:
5 - 40 мл/мин

Наконечник: LED
NEWTRON SLIM B.LED
голубое кольцо F12900
белое кольцо F12905

Вес наконечника (гр): 48

Вес прибора (гр): 2100

Размеры (ГхШхВ):
260x185x140

Жидкий индикатор налета
F.L.A.G.™ for B.LED

Bluetooth: удаленное
управлению прибором

Размер наконечника (мм): 110, Ø 18
Кабель наконечника (м): 2,04
Ножная педаль (размер и вес): 70x30x100 мм (150 гр)
Класс оборудования: Класс I - BF
Электропитание: 100-240 вольт 50/60Гц
Ультразвуковая частота: 28 кГц - 36 кГц
Класс медицинского прибора: II a
(в соответствии с 93/42/ЕЕС)

Стерилизация наконечника и аксессуаров (ключей, боксов и тд.) в автоклаве в соответствии с стандартом EN ISO-17665-1
Для большей информации смотрите инструкцию. Эти приборы произведены в соответствии с (IEC 60601 1) и EN ISO 13487
системой контроля качества.

F.L.A.G.
FOR BLED

SATELEC
ACTEON

Линейка обновленных
пьезо-ультразвуковых
генераторов

PURE
NEWTRON





NEUTRON P5^{XS}



Благополучие


Представляем новую линейку NEWTRON® ультразвуковых генераторов. АСТЕОН® SATELEC® опять произвела технологическую, и клиническую революцию в точном, и безболезненном лечении.

➤ Индикатор зубного налета **BLED**

➤ Удаленное управление

Экономия времени и комфорт пациента гарантированы!

NEWTRON P5

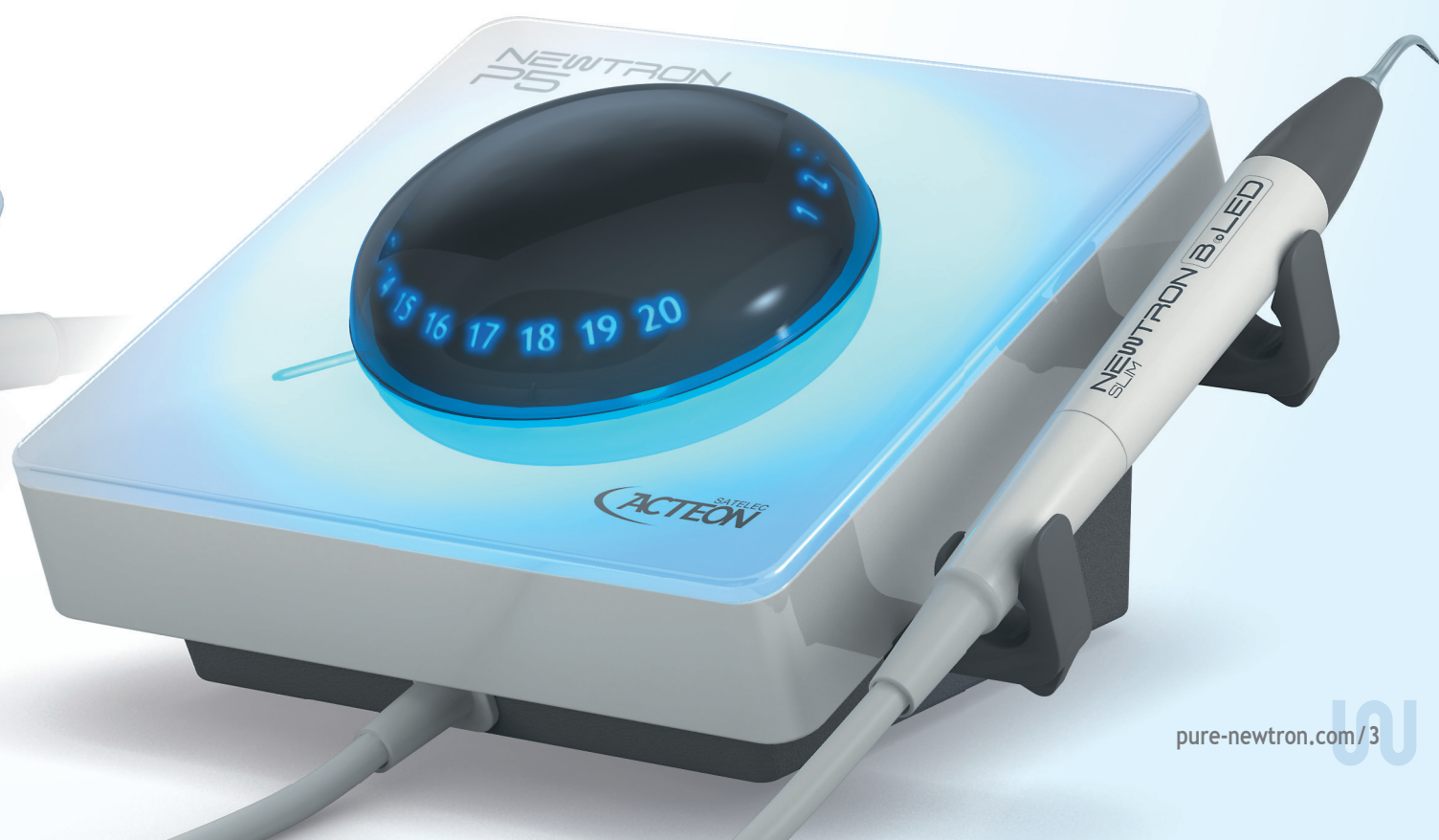



Улучшенная эргономика

Наклоненная фронтальная панель

- ➤ легкое взаимодействие с врачом
- ➤ быстрый доступ к настройкам

Стеклопанель и лаконичный дизайн

- ➤ полностью водонепроницаемый и гигиеничный

Съемный регулятор мощности

- ➤ легко дезинфицировать

Интуитивная настройка

Легко выбрать нужную мощность для каждой насадки в соответствии с системой цветовой кодировки (CCS)

- ➤ большой диапазон мощностей
- ➤ снижен риск поломки насадки

Подсвечиваемый регулятор мощности

- ➤ выбранный режим хорошо заметен
- ➤ приятное и успокаивающее свечение

Эксклюзивный держатель наконечника

- ➤ может быть установлен с лицевой или боковой стороны
- ➤ уменьшен риск падения наконечника
- ➤ снимаемый и автоклавируемый держатель

NEWTRON® SLIM B.LED наконечник великолепно сбалансирован

Корпус тоньше, а кабель более гибкий

- ➤ лучше лежит в руке и не скользит
- ➤ съемный и автоклавируемый носик

Начинка из титана

- ➤ нет контакта жидкости со сталью
- ➤ чрезвычайно устойчив к коррозии, долговечен

Отличная видимость во рту. Зубной налет хорошо заметен благодаря синим LED

- ➤ 6 LED высокой интенсивности (100,000 Люкс)
- ➤ 2 белых и голубых LED кольца легко заменяются и автоклавируются

Дизайн



Практика

Удвоенная эффективность и мягкое лечение

Крупнейший выбор насадок на рынке

- ➤ доступно более 70 насадок
- ➤ клиническая универсальность прибора

Внешняя система ирригации отвечает всем клиническим потребностям

Цилиндрический контейнер и новые крышки

- ➤ герметичный и устойчивый
- ➤ легко наполнять даже во время процедуры

Контейнер с мерными делениями на 300 мл или 500 мл

- ➤ хорошо видно количество использованного ирриганта
- ➤ жидкости можно смешивать прямо в контейнере

Легкая настройка ирригации

- ➤ автономная продувка
- ➤ снимаемый регулятор для лучшей дезинфекции

Система CRUISE CONTROL® автоматически управляет насадкой

CRUISE CONTROL®
SYSTEM

↓
Максимальная
эффективность

+

Деликатное
лечение

+

Меньшая
устоляемость






NEWTRON
PSxs



SATELEC
ACTEON

NEWTRON B. LED
CLIM

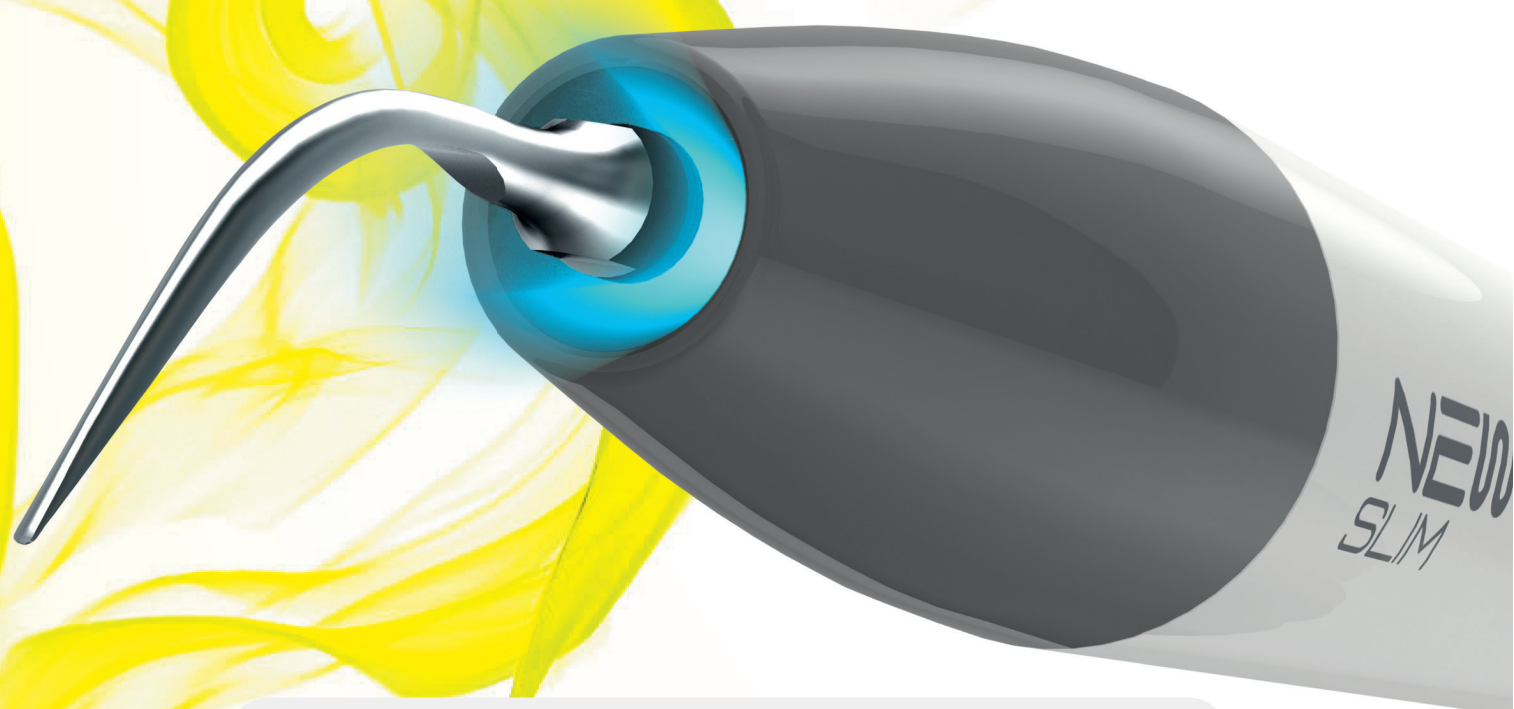

B^{CO}LED

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА для врача

- ➤ зубной налет становится легко заметен
- ➤ оптимизация лечения за счет локализации проблемных участков
- ➤ экономит время и деньги

для пациента

- ➤ более комфортная и короткая процедура, с большей эффективностью
- ➤ безболезненное лечение

Обнаружение


B.LED технология – эксклюзивная инновация SATELEC® для точного обнаружения и удаления зубного налета, с использованием флуоресценции.

1. Нанесение на зубной налет жидкого индикатора F.L.A.G.™ для B.LED.
2. Обнаружение зубного налета с помощью флуоресценции, видимой под голубым светом NEWTRON® SLIM B.LED наконечника.
3. Обнаружение и одновременное удаление зубного налета.

- ➤ Раствор разводится прямо в ирригационном контейнере NEWTRON® P5XS и наносится во время процедуры. Либо наносится на зубы с помощью кисточки. Процедура нанесения F.L.A.G.™ чрезвычайно проста, а результат превосходит все ожидания!
- ➤ Синий и белый свет LED колец прекрасно сбалансирован, и обеспечивает великолепную видимость, и флуоресцирование индикатора на зубном налете.



без B.LED

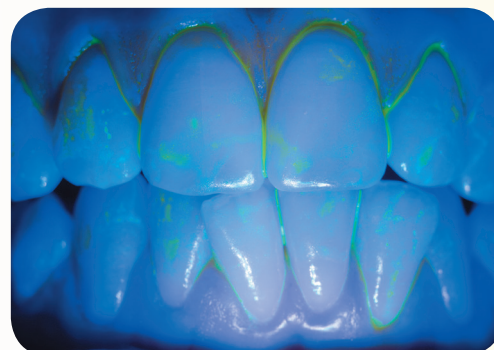

с B.LED

“ Я использую F.L.A.G. для B.LED каждый день, и время проведения процедуры скалинга значительно сокращается! Увидеть налет теперь очень легко. Также B.LED технология позволяет оценить эффективность проводимого мной лечения. ”



1

Возьмите под контроль P5XS с помощью приложения



Управление

Настройте ваш прибор с смартфона или планшета !

- 1** Загрузите приложение P5XS, и активируйте Bluetooth на своем смартфоне или телефоне.
 - 2** Снимите регулятор мощности на NEWTRON® P5XS для активации беспроводного режима. Накрутите насадку на наконечник.
 - 3** Кликните на цвет накрученной насадки. Затем выберите нужную насадку.
 - 4** Мощность и частота ирригации автоматически установятся на рекомендованном SATELEC® уровне. Можете начинать лечение!
- Также настройки можно изменить вручную.

Точность больше, поломок инструмента меньше

- > Прибор удаленно управляется врачом или ассистентом
- > Мощность и ирригация устанавливаются автоматически
- > В приложении доступны учебные видео по использованию насадки



www.pure-newtron.com

4