

# БЫСТРЫЕ, ОСТРЫЕ, НОВЫЕ



## «ЗОЛОТЫЕ» ФРЕЗЫ ANKYLOS уже в РОССИИ!

Новое поколение фрез обладает улучшенной остротой и режущей способностью, а также визуализацией маркировки глубины. Фрезы предназначены для многократного использования, стерильная упаковка обеспечивает возможность их немедленного применения. Желтое покрытие из нитрида титана позволяет легко отличать новые фрезы от фрез текущего поколения.



# АКЦИЯ

при покупке

**5** имплантатов ANKYLOS C/X –  
«золотая» фреза в **ПОДАРОК!**\*



**НОВЫЕ ФРЕЗЫ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ  
В РОЗНИЦУ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!**

**ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – В ОТДЕЛАХ ПРОДАЖ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СТОМУС».**




[WWW.STOMUS.RU](http://WWW.STOMUS.RU)

**8 800 550-48-48**  
(бесплатно по всей России)

\*Акция действует в период с 25.03.2019 г по 30.06.2019 г. Количество товара на складах ограничено. В подарок предоставляется любая фреза А или В диаметров по выбору покупателя по наличию на складе. Подарок не суммируется с оптовыми и индивидуальными скидками и другими акциями.

# АССОРТИМЕНТ ФРЕЗ для имплантатов А и В диаметров:

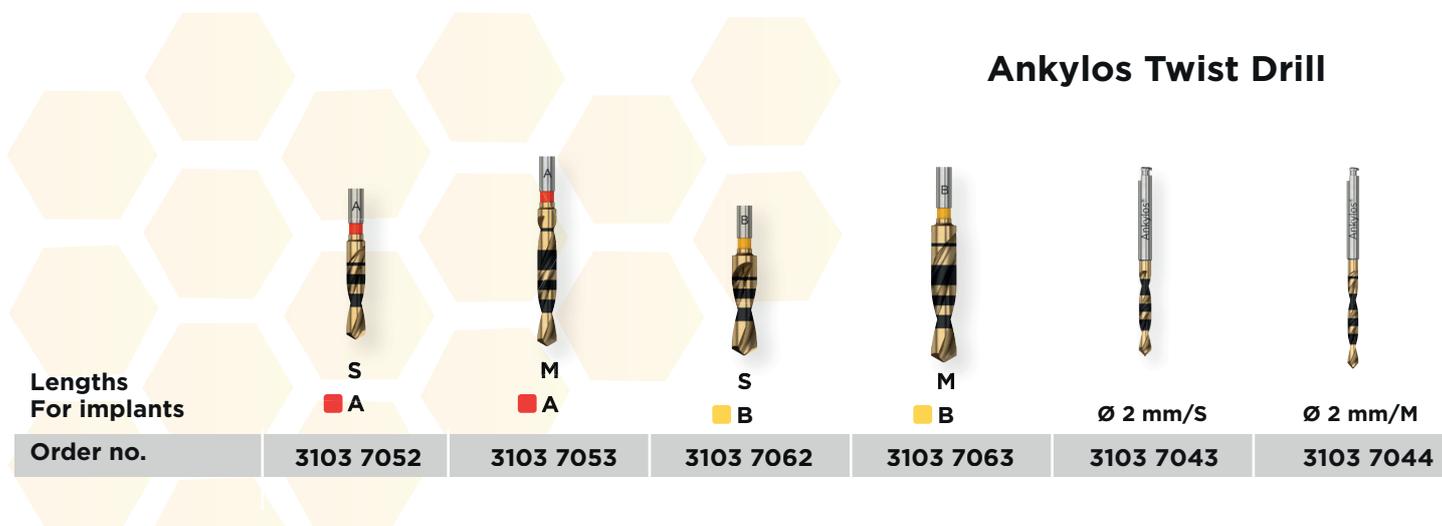

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ФРЕЗАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Улучшенная эффективность препарирования делает внутреннюю ирригацию фрез нового поколения устаревшей. Поэтому для предотвращения нагревания костной ткани, необходимо применять внешнее охлаждение и прерывистое сверление.
- Благодаря новому дизайну фрез рекомендуемая скорость составляет до 1500 оборотов в минуту, а из-за улучшенной режущей способности восприятие сопротивления в кости меньше, чем при использовании фрез текущего поколения. Это следует учитывать при принятии решений о применении конических разверток и метчиков резьбы.
- Цветовая кодировка диаметров остается прежней в обоих брендах, для идентификации фрез используется лазерная маркировка ANKYLOS на хвостовиках.
- Новые фрезы могут быть использованы с существующими хирургическими наборами.
- В случае многократного применения новые фрезы могут быть очищены и повторно стерилизованы до 10 раз максимум (т.е. для 10 пациентов). Как и все инструменты, они должны быть тщательно очищены и стерилизованы после каждого хирургического вмешательства, и подлежат замене, как только их режущая способность уменьшится. Мы настоятельно рекомендуем во время процедуры стерилизации фрез использовать соответствующее крепление для предотвращения повреждения режущих краев!



### СТОМУС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, 194291, пр. Луначарского, д. 49  
Тел.: +7 (812) 702-40-07, +7 (812) 558-92-72  
Тел./факс: +7 (812) 558-15-15, e-mail: office@stomus.ru

### СТОМУС - МОСКВА

Москва, 127015, ул. Бутырская, д. 6, корп. 3, этаж 3,  
«НУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД»  
Тел. /факс: +7 (495) 669-78-72 (73), e-mail: stomus-m@stomus.ru

### СТОМУС - НОВОСИБИРСК

Новосибирск, 630004, ул. Челюскинцев, д. 14/2  
Тел. /факс: +7 (383) 201-04-62, +7 (383) 201-09-46, e-mail: stomus-sibir@inbox.ru

### СТОМУС - КРАСНОДАР

Краснодар, 350000, ул. Октябрьская-Северная, д. 183/326, оф. 425  
Тел.: +7 (861) 290-80-34, e-mail: stomus.krr@gmail.com

[www.stomus.ru](http://www.stomus.ru) **8 800 550-48-48** (бесплатно по всей России)