




AcryPlus



ACRYLIC TEETH

Made in Italy

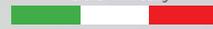

We take care of your smile

AcryPlusEvo надолго сохранит эстетику ваших работ

AcryPlus **evo**

Качественные материалы, эстетика, естественная морфология прикуса, а также практичность и простота использования лежат в основе нашей работы, направленной на то, чтобы Вы смогли получить наилучшие результаты при выполнении следующих видов ортопедических конструкций:


- ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
- УСЛОВНО-СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
- «ВСЕ НА ЧЕТЫРЕХ»
- БАЛОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ
- БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ

AcryPlus **evo** **RX**

Высокоэстетичные рентгеноконтрастные зубы

Acry Plus EVO RX - это линейка высокоэстетичных рентгенконтрастных зубов, которые применяются для изготовления временных зубных протезов, используемых в качестве шаблонов для захвата ТАС-изображений.

Acry Plus EVO RX имеют такую же форму, как и зубы Acry Plus EVO, что обеспечивает лучшую эстетическую и функциональную адаптацию пациента к протезам. Это означает, что временные протезы будут идеальным прототипом постоянных протезов.

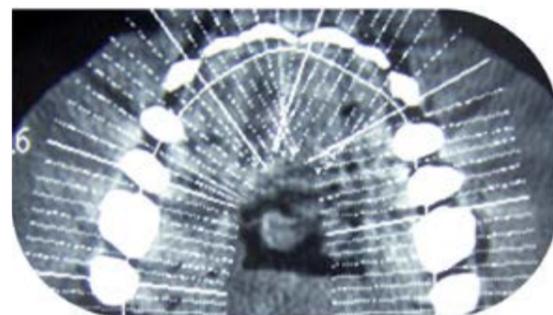

Преимущества:

Экономия времени и средств благодаря тому, что временный протез может применяться также и для диагностических целей.

Временный и постоянный протезы изготавливаются из зубов одинаковой формы. Это позволяет обеспечить лучшую эстетическую и функциональную адаптацию пациента к новому протезу.


Эстетика

Срезанная шейка и многослойное нанесение эмали для естественного жемчужного блеска.

Использование последних достижений в области CAD-CAM технологий для текстурирования и индивидуализации позволяет получить естественную поверхность зубов.

Благодаря широкой шейке облегчается процесс проведения эстетической адаптации протеза.

Большая форма моляров позволяет создать стабильную окклюзию.

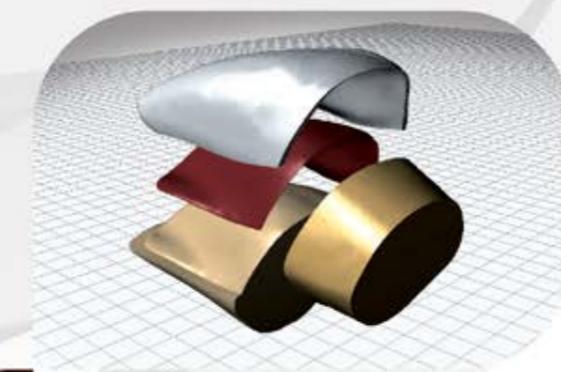

Технология

Эластичность полимера: зубы из ПММА - полимера **очень эластичны** и имеют лучшее сопротивление жевательным усилиям.

Высокое сопротивление изнашиванию: использование полимера с высоким молекулярным весом гарантирует долговечность протеза в результате низкой стираемости зубов.

Использование ПММА-полимера в качестве основания обеспечивает **безупречное соединение** между зубами и полимером, исключая проблему отсоединения одиночных зубов от протеза.






Использование

Жевательные зубы имеют особую анатомию для простого и быстрого создания кривых Уилсона и Шпее.

Специальная форма шеек жевательных зубов упрощает и ускоряет процесс их установки и не требует спиливания торца зуба.



Молекула ПММА

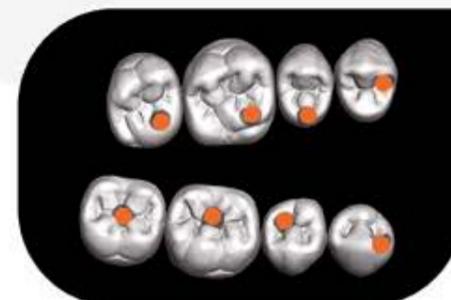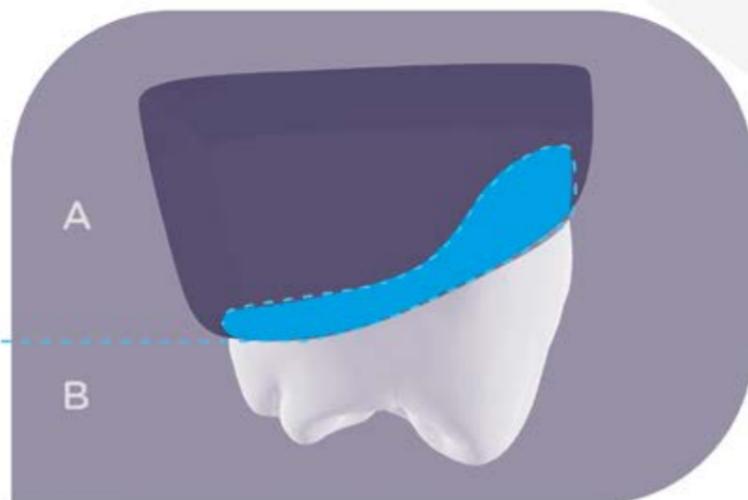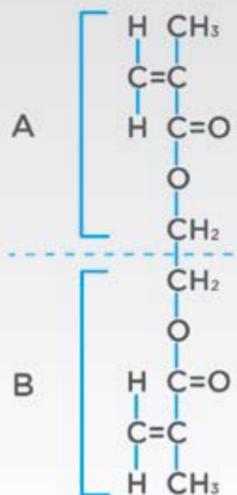


Преимущества

За счёт уменьшения количества контактных пунктов снижается травматичность структур под протезом.

Уменьшение контактов между антагонистами сокращает риск чрезмерной мышечной нагрузки, тем самым предотвращая нарушения стоматогнатической системы.

Карточка форм

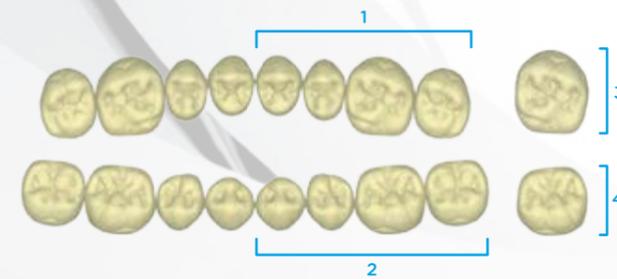

Доступные цвета для Acry Plus EVO

A1 A2 A3 A3,5 A4 B2

C1 C3 D2 D3


1A 2A 3A 4A 2B 1D

A1 - A2 - B2 - 1A - 2A	Белый
A3 - A3,5 - 1D - 2B	Желтый
A4 - 3A	Светло-коричневый
4A - C1 - D2 - D3	Серый
C3	Темно-коричневый

Артикуляционная таблица*

Верхние резцы	Нижние резцы	Жевательные зубы	
ES3	EI2	ED2	Z14
ES5	EI4	ED2-ED4	Z14-Z17
ES8	EI4-EI5	ED4	Z17
ES10	EI7	ED4-ED6	Z17-Z20
ES12	EI5-EI7	ED4	Z17
ES15	EI7-EI9	ED4-ED6	Z17-Z20
ES17	EI9	ED6	Z20
ES18	EI7-EI9	ED6	Z20

* Комбинации являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от типа их установки и клинических особенностей

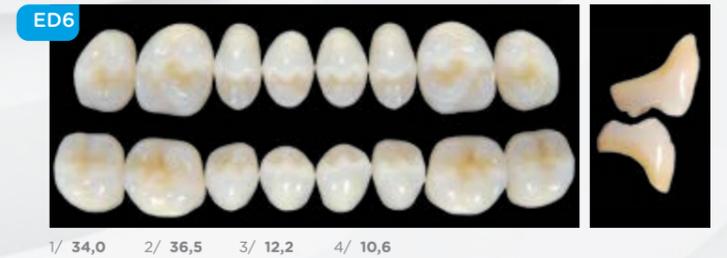

AcryPlus NM



Анатомические зубы, подобные человеческим зубам с одиночными контактными пунктами при максимальном бугорково-фиссурном контакте. Угол наклона бугров 45°.



8 800 550-48-48
(бесплатно по всей России)

WWW.STOMUS.RU

СТОМУС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, 194291,
пр. Луначарского, д. 49
Тел. +7 (812) 70-240-07
+7 (812) 558-92-72
+7 (921) 915-35-05
Тел./факс: +7 (812) 558-15-15
e-mail: office@stomus.ru

СТОМУС - МОСКВА

Москва, 127015,
ул. Бутырская, д. 6, корп. 3,
«НУЗ «Центральная стоматологическая
поликлиника ОАО «РЖД»
Тел. /факс: +7 (495) 669-78-72 (73)
+7 (929) 586-23-19
e-mail: stomus-m@stomus.ru

СТОМУС - НОВОСИБИРСК

Новосибирск, 630004,
ул. Челюскинцев, д. 14/2
Тел. /факс: +7 (383) 201-04-62
+7 (383) 201-09-46
e-mail: stomus-sibir@inbox.ru

СТОМУС - КРАСНОДАР

Краснодар, 350000,
ул. Октябрьская-Северная,
д. 183/326, оф. 425
Тел.: +7 (861) 290-80-34
e-mail: stomus.krr@gmail.com



**Ruthinium®
Group**

Мы заботимся о Вашей улыбке