

AcryRock

We take care of your smile



АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ - ACRYLIC TEETH

МИНИ-СКЛАД В ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

300 пластинок в год

Асгу Rock (двухслойные)
Асгу Lux (трехслойные)



Бокс в подарок!

МЕНЕДЖЕР ФИРМЫ «СТОМУС» ПРИЕДЕТ В ВАШУ ЛАБОРАТОРИЮ
ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

ГРУППА КОМПАНИЙ «СТОМУС»

WWW.STOMUS.RU

Единый телефон: **8 800 550-48-48** (бесплатно по всей России)

г. Санкт-Петербург	пр.Луначарского, д.47, тел +7 (921) 915 35 05, sale@stomus.ru
г.Москва	ул. Павловская, д.6, 5 эт, зона А, тел +7 (926) 603 68 32, stomus-m@stomus.ru
г. Новосибирск	ул.Челюскинцев, д.14/2, оф.416, тел. (383) 201 04 62, stomus-sibir@stomus.ru
г.Краснодар	ул.Октябрьская-Северная, д.183/326, тел (921) 592 25 87, stomus-krr@gmail.com

РЕЗЦЫ *INCISORS*




Выбор группы резцов

Определение ширины фронтальной группы зубов по Ли.


Selecting the incisor groups

Establishing the width of the front group according to Lee's research.

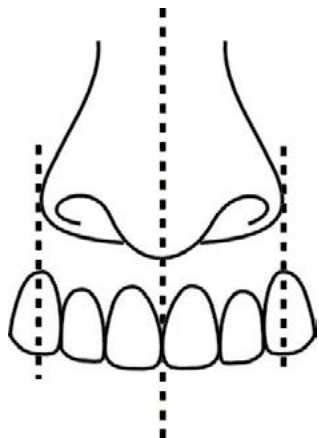

Воображаемая вертикальная линия, которая касается краёв крыльев носа, проходит через ось клыков.

The imaginary vertical line that touches the margins of the pinna passes through the axis of the canines.

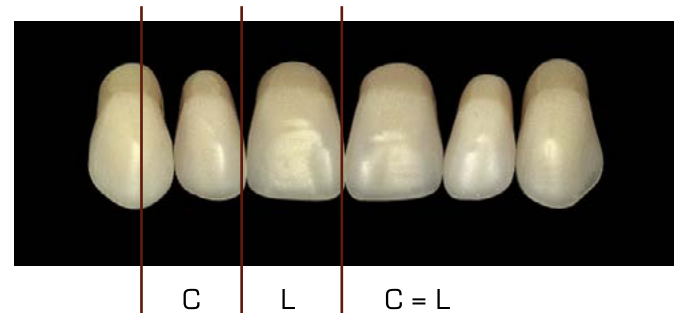


Ширина центрального резца равна сумме ширины бокового резца и ширины мезиальной части клыка.

The central width is given by the lateral added to the mesial part of the canine.


Определение формы согласно Вильямсу:
форма зубов соответствует форме лица.

Establishing the shape according to Williams:
the shape of the teeth is chosen according to the shape of the face.

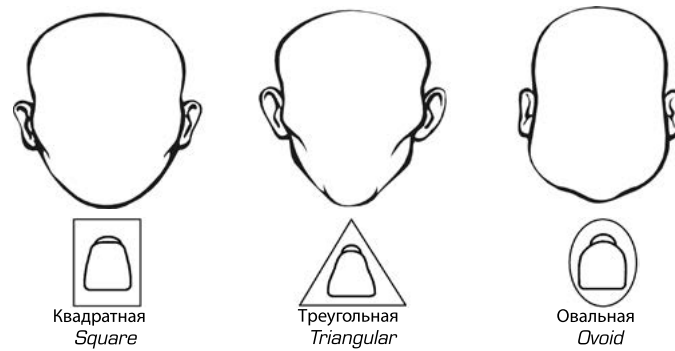

По Герберу: форма и расположение центральных зубов определяется формой основания носа.

According to Gerber: the shape and position of the front teeth is established by the basal line of the nose.

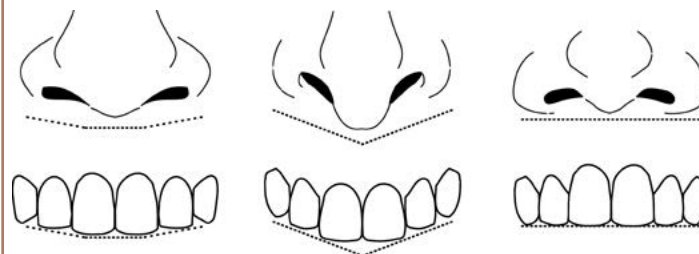

В соответствии с формой альвеолярного отростка:

если нет соответствия с приведёнными выше классификациями, то форму зубов можно определить в соответствии с формой верхнего альвеолярного отростка.

According to the shape of the alveolar crest:

if no references are provided according to the previous classifications, the shape of the upper alveolar crest can provide information as to the shape of teeth to be used.



МОЛЯРЫ *MOLARS*




Анатомически: моляры характеризуются буграми для модифицируемости при использовании во всех смешанных техниках. Угол между буграми 25°-33°.


Anatomic: molars characterised by accentuated anatomy to guarantee modifiability for use in all assembly techniques. Cusp angle: 25°-33°.

Геометрически: зубы изготовлены в соответствии с данными исследования Старка по изготовлению билатерально сбалансированных зубных протезов. Угол между буграми 20°.

Geometric: teeth constructed according to Strack's research for constructing bilateral balanced dentures. Cusp angle: 20°.

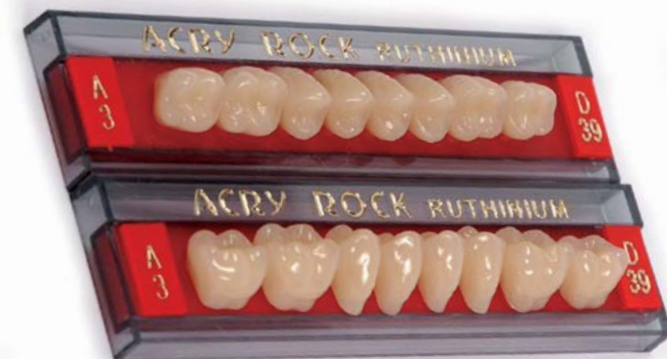

Технологии и исследования материалов, применяемых для повышения качества изделий Technology and research into materials to improve quality

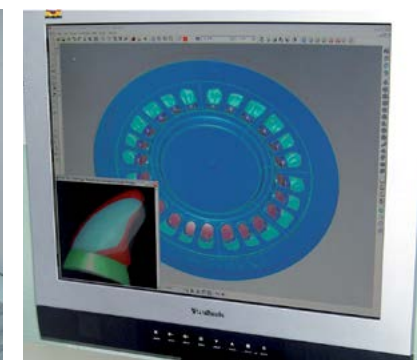

Качество достигается благодаря применению новейших CAD/CAM технологий
Quality is given by using the latest CAD/CAM technology



Трёхмерное
изображение дентина/шейки
3D view dentin



Трёхмерное
изображение эмали/шейки
3D view enamel



Трёхмерный
послойный срез зуба
3D section of stratification


Высокомолекулярное соединение полимера H.M.W. (PMMA поперечно-связанный)
High molecular weight resin H.M.W. (PMMA Cross-Linked)

Использование высокомолекулярного полимера (полимера с высоким молекулярным весом) в купе с особыми поперечными молекулярными связями обеспечивает:


- дополнительную жёсткость
- высокую абразивную устойчивость
- стабильность цвета
- высокую устойчивость к зубному налету

The use of high molecular weight modified polymers combined with special molecular linkers (Cross Linking) gives:

- **Exceptional hardness**
- **Excellent abrasion resistance**
- **Stable colour**
- **Excellent resistance to plaque**

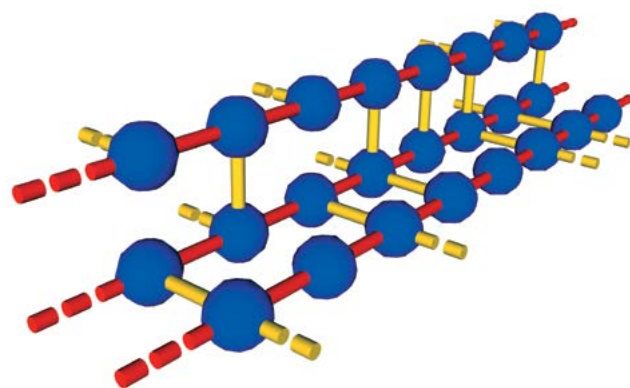

Молекула PMMA
PMMA molecule

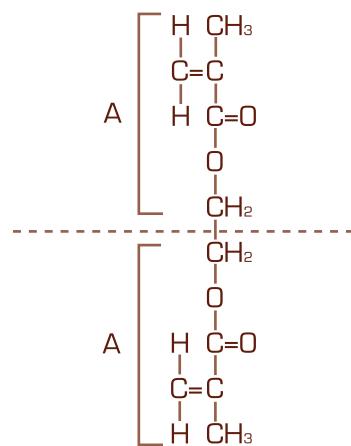


Поперечные связи между молекулярными цепочками
Cross-linked bond between molecular chains

Полимерная связь между мономерами
Polymer bond between monomers


Мономерная единица
Monomer unit

Оттенки Shades

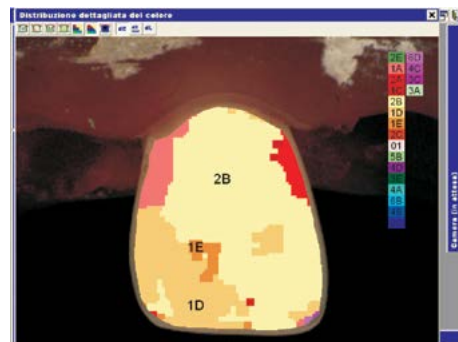

Искусственные зубы Рутиниум представлены в широкой гамме оттенков. Использование спектрофотометрии на стадии контроля гарантирует устойчивый соответствующий палитре цвет.

Ruthinium artificial teeth are available in a wide range of shades. The use of spectrophotometers during the control phase guarantees constant true colours.

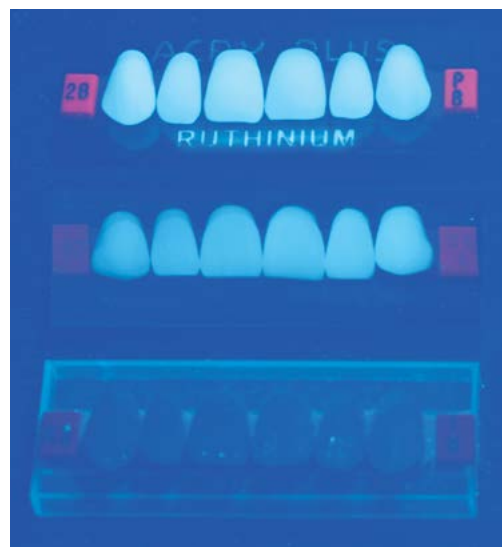




Флюоресценция — это форма люминесценции, проявляющаяся в определённых веществах. Это свойство натурального зуба, видимое в ультрафиолетовом освещении и представляющее собой белое с голубым оттенком свечение зуба. Флюоресценцией обладают все искусственные зубы Рутиниум, что дает изделиям ещё более натуральный вид.

Fluorescence is a form of luminescence that is found in certain substances. It is a feature that is found in natural teeth which, when struck by ultraviolet rays, give off a white-bluish light. This feature is found in all Ruthinium teeth to give them an even more natural look.



Шкала Оттенков - Shade Guide

Acry Rock V
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4
E1
F1 - F2

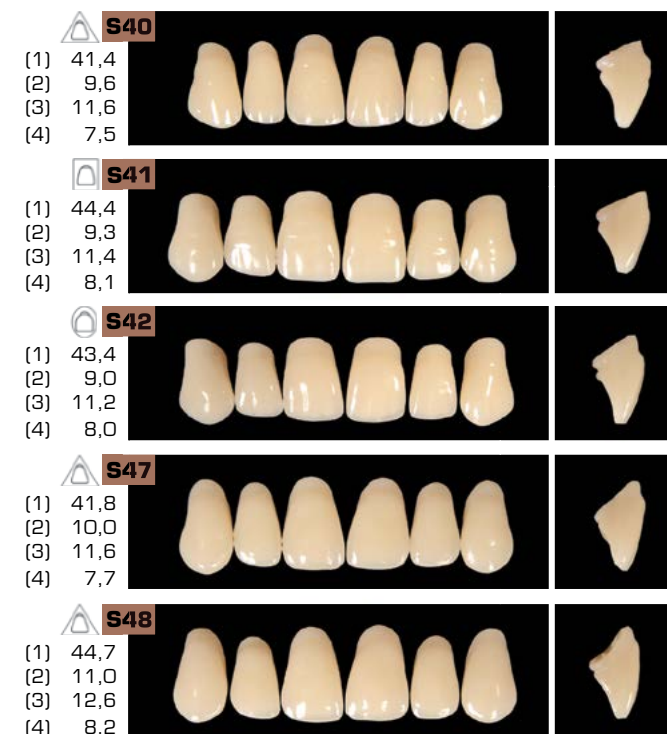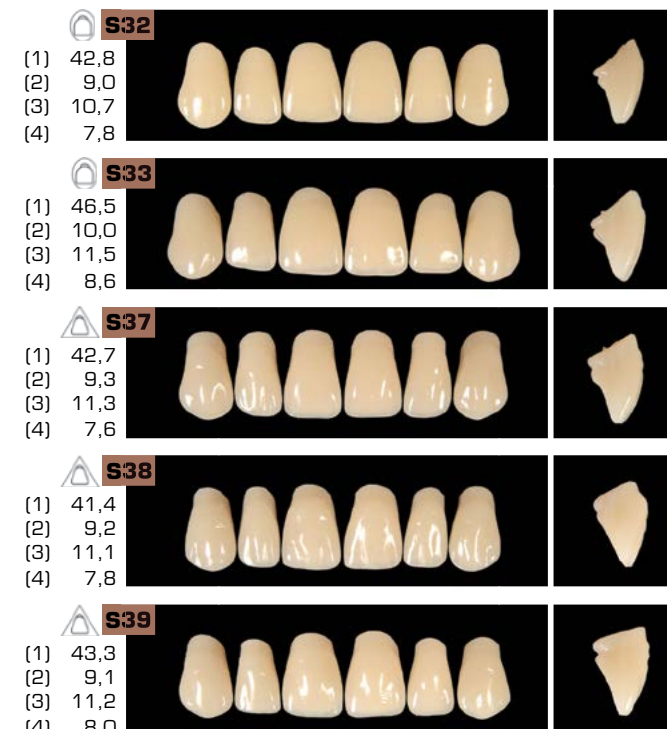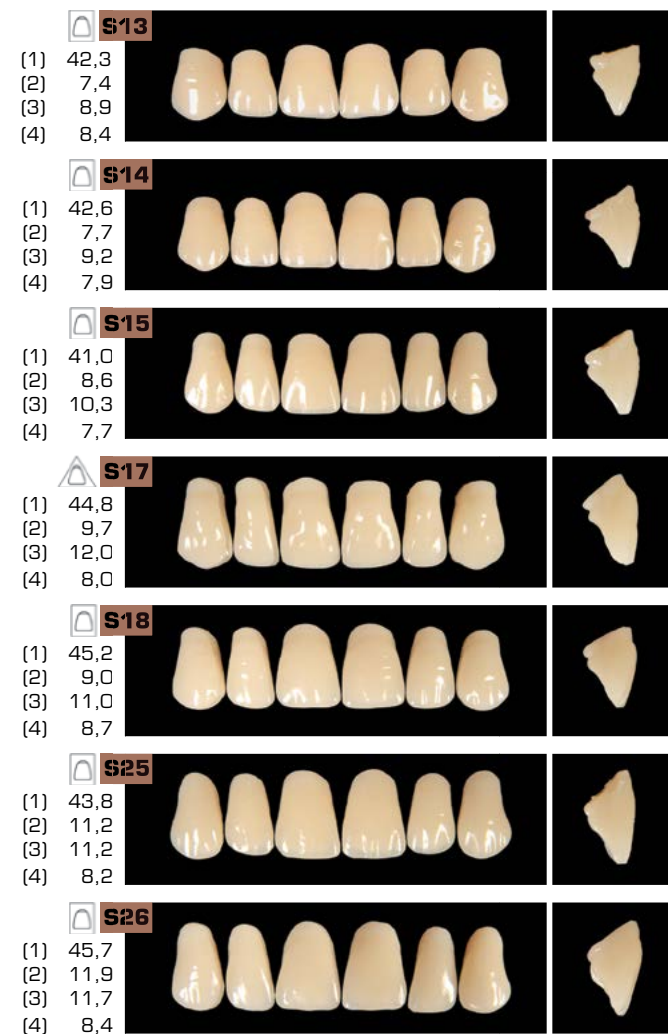



S51

(1) 39,7

(2) 7,7

(3) 10,0

(4) 7,2

S52

(1) 41,9

(2) 9,4

(3) 11,2

(4) 7,4

S53

(1) 43,7

(2) 9,7

(3) 11,8

(4) 8,3

S54

(1) 45,8

(2) 9,3

(3) 12,0

(4) 8,3

S55

(1) 44,7

(2) 13,1

(3) 12,4

(4) 8,0

S56

(1) 47,0

(2) 10,0

(3) 12,2

(4) 8,1

S60

(1) 39,6

(2) 8,8

(3) 10,6

(4) 6,8

S61

(1) 39,6

(2) 8,9

(3) 10,8

(4) 7,3

S62

(1) 40,0

(2) 8,9

(3) 10,9

(4) 7,3

S63

(1) 43,4

(2) 9,7

(3) 11,7

(4) 7,9

S64

(1) 41,5

(2) 9,3

(3) 11,8

(4) 7,5

S65

(1) 43,4

(2) 10,0

(3) 13,0

(4) 7,7

S66

(1) 49,0

(2) 11,7

(3) 13,9

(4) 9,0

S67

(1) 50,4

(2) 10,3

(3) 12,2

(4) 9,2

S68

(1) 52,8

(2) 12,5

(3) 15,2

(4) 9,7

Таблица Соответствия
Articulation table

S 13	I 13	D 35
S 14	I 13	D 35
S 15	I 38	D 37 - D 43
S 17	I 41	D 39 - D 44
S 18	I 18	D 39 - D 44
S 25	I 18	D 39
S 26	I 46	D 39 - D 45
S 32	I 41 - I 42	D 39 - D 44
S 33	I 46	D 45
S 37	I 37	D 36 - D 42
S 38	I 38	D 37 - D 43
S 39	I 51	D 35
S 40	I 40	D 36 - D 42
S 41	I 41	D 39 - D 44
S 42	I 42	D 39 - D 44
S 47	I 18 - I 53	D 39
S 48	I 46	D 45
S 51	I 51	D 35
S 52	I 52	D 36 - D 42
S 53	I 53	D 39 - D 44
S 54	I 53	D 39 - D 44
S 55	I 66	D 45 - D 46
S 56	I 46	D 45
S 60	I 60	D 33
S 61	I 61	D 36 - D 42
S 62	I 61	D 36 - D 42
S 63	I 63	D 39 - D 44
S 64	I 64	D 41
S 65	I 65	D 41
S 66	I 66	D 44
S 67	I 67	D 45
S 68	I 68	D 46

I13

(1) 33,3

(2) 7,4

(3) 9,2

(4) 5,0

I18

(1) 36,3

(2) 8,6

(3) 10,4

(4) 5,3

I37

(1) 32,2

(2) 7,1

(3) 8,6

(4) 4,7

I38

(1) 31,7

(2) 8,0

(3) 10,0

(4) 4,7

I40

(1) 31,5

(2) 9,2

(3) 11,0

(4) 4,7

I41

(1) 34,2

(2) 8,5

(3) 10,2

(4) 5,0

I42

(1) 35,0

(2) 8,2

(3) 9,9

(4) 5,4

I46

(1) 35,1

(2) 10,2

(3) 10,4

(4) 5,0

I51

(1) 31,2

(2) 7,3

(3) 9,3

(4) 5,5

I52

(1) 32,7

(2) 8,4

(3) 10,2

(4) 4,9

I53

(1) 34,1

(2) 8,7

(3) 11,3

(4) 5,2

I60

(1) 30,7

(2) 8,0

(3) 9,8

(4) 4,5

I61

(1) 30,7

(2) 8,3

(3) 10,0

(4) 4,6

I63

(1) 34,8

(2) 9,4

(3) 11,0

(4) 4,9

I64

(1) 31,5

(2) 8,7

(3) 10,5

(4) 4,6

I65

(1) 34,7

(2) 10,1

(3) 12,2

(4) 5,0

I66

(1) 35,5

(2) 10,4

(3) 12,8

(4) 5,1

I67

(1) 40,7

(2) 10,3

(3) 12,7

(4) 5,7

I68


(1) 39,2

(2) 11,2



(3) 13,4


(4) 5,7

Код Товара Product Code	
0010013	ACRY ROCK V 6 ВЕРХНИХ
0010014	ACRY ROCK V 6 НИЖНИХ
0010015	ACRY ROCK V 8 ВЕРХНИХ
0010016	ACRY ROCK V 8 НИЖНИХ
0020003	ACRY ROCK V НАБОР ИЗ 28 ЗУБОВ
0020004	ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПАПКА ACRY ROCK V
0030002	ШКАЛА ОТТЕНКОВ ACRY ROCK V

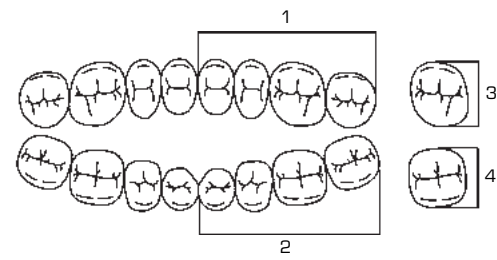

A: Анатомические - *Anatomic*
G: Геометрические - *Geometric*

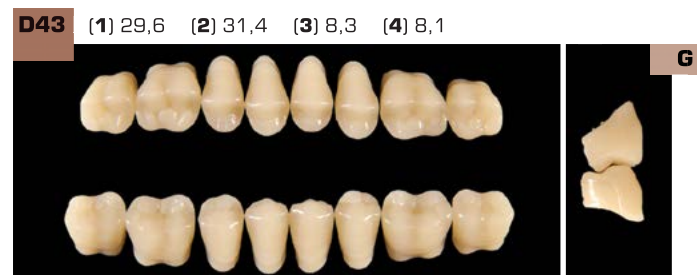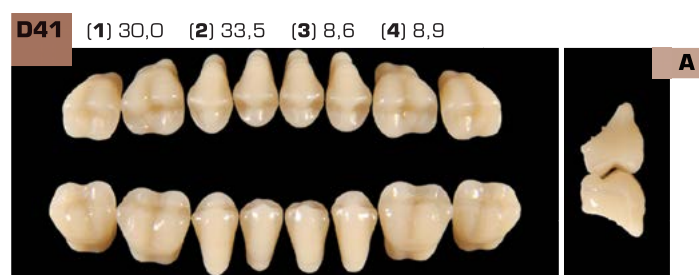

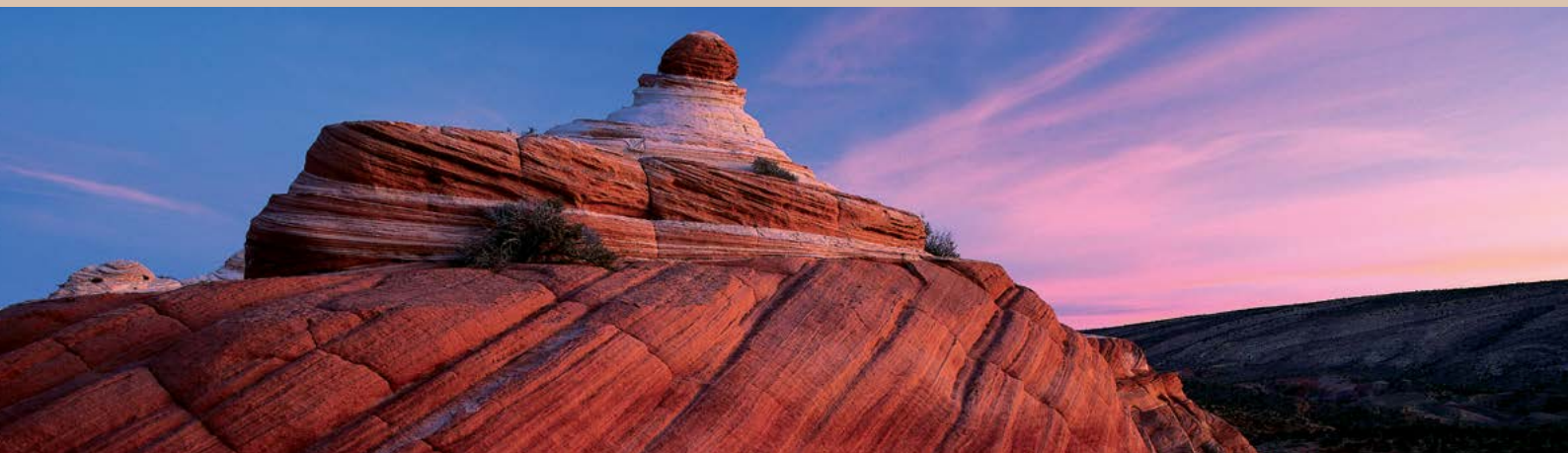

We take care of your smile

Группа Компаний «СТОМУС»

www.stomus.ru

Единый телефон:

8 800 550-48-48

(бесплатно по всей России)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

пр. Луначарского, д. 49
Тел.: +7 (812) 438-16-73 (74)
+7 (921) 915-35-05
office@stomus.ru

НОВОСИБИРСК

ул. Челюскинцев, д. 14/2, оф. 416
Тел.: +7 (383) 201-09-46
stomus-sibir@stomus.ru

МОСКВА

ул. Павловская, д. 6, 5 эт., зона А
Тел.: +7 (495) 669-78-72
+7 (926) 603-68-30
Stomus-M@stomus.ru

КРАСНОДАР

Тел.: +7 (921) 592-25-87
+7 (931) 208-90-95
stomus.krr@gmail.com