

Сразу после использования промойте чистой водой, чтобы удалить следы продуктов и очистить внутреннюю часть линии.



В течение одной минуты под проточной водой почистите щеткой, промойте шприцем. Затем продезинфицируйте спиртосодержащими салфетками.



Тщательно продезинфицируйте спиртосодержащими салфетками. Следуйте инструкциям производителя салфеток.



Тщательно промыть чистой водой.

H₂O



После 30 использований, очистки и стерилизаций линия больше не пригодна. Выбросьте линию, соблюдая требования страны по утилизации.



Высушите чистым воздухом, поместите в стерилизационные пакеты и стерилизуйте в автоклаве класса В.

